

# dermaOXY

**bruger- og behandlingsmanual for  
professionelle**



## **Indholdsfortegnelse**

<b>1. dermaOXY maskine</b>	<b>3</b>
<b>2. Air brush og slange</b>	<b>5</b>
<b>3. Før behandling</b>	<b>5</b>
<b>4. Behandling af ansigt</b>	<b>6</b>
<b>5. Efterbehandling af ansigt</b>	<b>9</b>
<b>6. Behandling af hår</b>	<b>10</b>
<b>7. Efterbehandling af hår</b>	<b>12</b>
<b>8. Produktbeskrivelse</b>	<b>12</b>
<b>8.1 dermaOXY hudserie</b>	<b>12</b>
<b>8.2 dermaOXY hårserie</b>	<b>13</b>

## 1. dermaOXY maskine

### Tillykke med din nye dermaOXY maskine

Du har modtaget en startpakke indeholdende oxygenmaskine, airbrush, slange, samt behandlingspakker m.m.. Med oxygenmaskinen følger en luftfugtbeholder med grøn slange og inhalator med grøn slange.

Da vi kun anbefaler at anvende oxygenmaskinen til dermaOXYbehandling, kan luftfugtbeholder og inhalator med grøn slange straks gemmes væk. Hvis maskinen bruges til traditionel oxygenbehandling, skal en læge kontaktes inden brug. Børn, psykisk syge og handicappede må kun anvende oxygenmaskinen under supervision.

Her er enkle sikkerhedsforskrifter vedrørende oxygenmaskinen:

- Skal altid stå op. Må ikke lægges ned eller vendes på hovedet
- Må ikke udsættes for ekstrem varme, kulde eller vand
- Skal stå på gulvet med mindst 10 cm til væg eller møbler
- Må ikke tildækkes under brug eller anvendes som bord. Luftåbningerne må aldrig tildækkes
- Kun godkendte teknikere må åbne oxygenmaskinen
- Brug ikke oxygenmaskinen i vådrum eller under bruseren
- Vær altid til stede når oxygenmaskinen er tændt
- Maskinen må kun anvendes til det, der står i denne manual
- Må ikke anvendes med andet udstyr end det, der står i denne manual
- Må ikke forbindes til andre oxygenmaskiner

**VIGTIGT! Det er strengt forbudt at ryge eller bruge andre former for ild i nærheden af oxygenmaskinen. Oxygen er ekstremt brandfarligt og kan antænde brandbart materiale samt være årsag til alvorlige brandskader på mennesker og materiel.**


**Når du starter maskinen, skal du lade den være tændt i minimum 5 minutter. Lad være med at tænde og slukke konstant, det nedsætter maskinens levetid.**

**Det anbefales, at oxygenmaskinen får et serviceeftersyn 1 gang om året. Kontakt din forhandler og bestil tid.**

Som andet elektronisk udstyr kan oxygenmaskinen blive påvirket af Radio Frekvens (RF).

**For yderligere informationer se hæfte (Oxygen Concentrator – User's manual) der følger med på engelsk.**

## Opsætning af maskine:

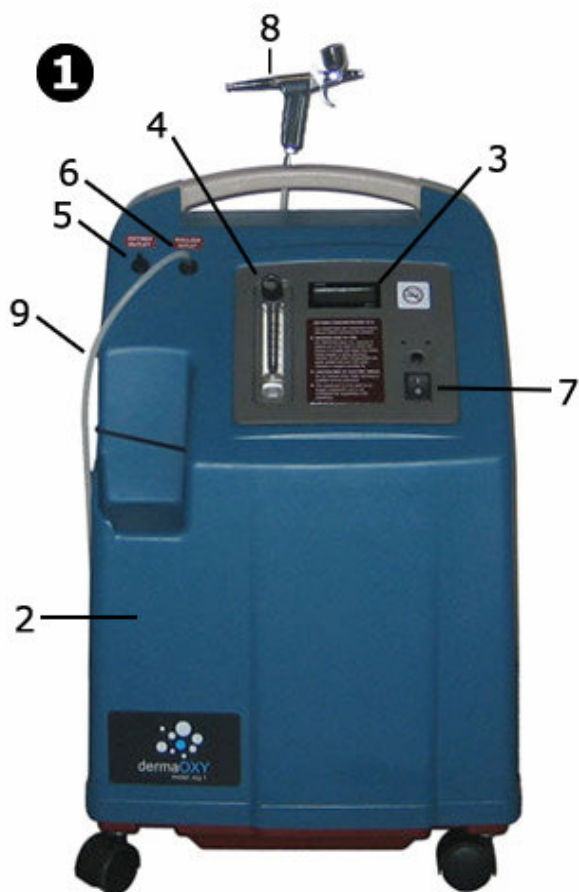


Start med at se, om maskinen (1) er beskadiget. Se efter, om der er skrammer eller brud på beskyttelseshætten (2), digitalskærmen (3), barmåleren (4), oxygen outlet (5) og nebulizer outlet (6).

Sæt stikket i stikkontakten og tænd maskinen på 1/0 knappen (7). Der vil nu stå "Hello" i digital skærmen (3), og i løbet af ganske få sekunder vil timeren starte. Den vil normalt stå på nogle timer, da alle maskiner bliver testet, før de bliver sendt på markedet. Lad maskinen køre i 5-10 minutter. Sluk maskinen. Maskinen er nu klar til brug.

Sæt air brush (8) og slange (9) sammen.

Vigtigt: Se næste kapitel – "2. Air brush og slange." Sæt slangen(9) ned over Nebulizer outlet (6). Tænd maskinen, se på barmåleren (4), skru op eller ned, så den står på 3 bar.

## 2. Air brush og slange

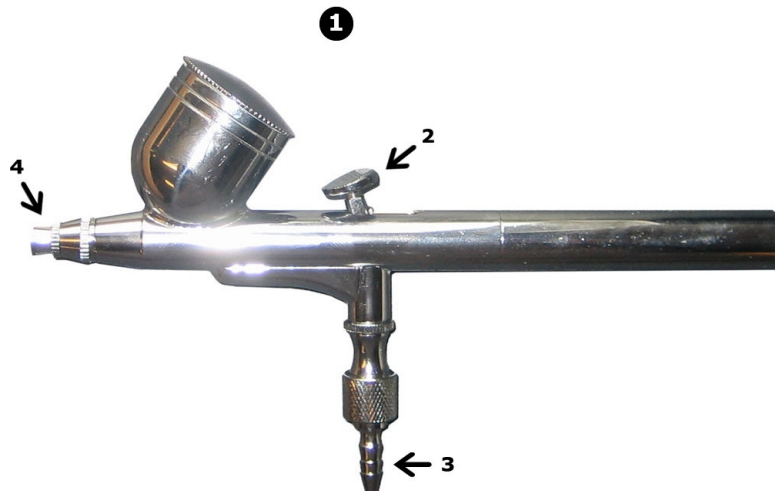

Du har modtaget en air brush (1). Når du har pakket air brushen ud, tryk aftrækkeren (2) let tilbage med tommelfingeren og prøv det samme mens du trykker aftrækkeren nedad; går dette let er air brushen klar til brug. Sæt slangen på slangemøtrikken (3).

Når aftrækkeren (2) trykkes ned **i udgangstilling** kommer der kun ilt ud, og trykkes aftrækkeren ned **og** trækkes tilbage kommer der væske (serum) og ilt ud. Rengøring af air brush: Fyld beholderen med vand (gerne varmt (ikke kogende) vand). Sprit eller anden desinficerende middel kan også anvendes. Start oxygenmaskinen, skru oxygenmaskinen op på 5 bar. Tryk aftrækkeren nedad og træk tilbage og tøm vandet eller anden væske fra air brushen ud i en skål. Derefter er den klar til brug.

Rengør det yderste hoved i spidsen for rester af serum/hud/make-up når det er nødvendigt. I enkelte tilfælde kan spidsen blive tilstoppet, skru da de 2 hoveder i spidsen (9) af, rens, tør og skru på.


Det er en god idé at have en ekstra air brush liggende.

## 3. Før behandling

Inden du går i gang med behandlingen, er det vigtigt at:

1. **Afrenselse huden grundigt – Vask håret med dermaOXY shampoo**
2. **Evt. fjerne de døde hudceller (peeling) – en god forbehandling**  
f.eks.med Diamond dermabrashion (hudslibning) øger virkningen af en dermaOXY behandling betydeligt – spørg distributøren om gode tilbud på multifunktionsmaskiner.
3. **Informere kunden om behandlingsprocessen**

## 4. Behandling af ansigt

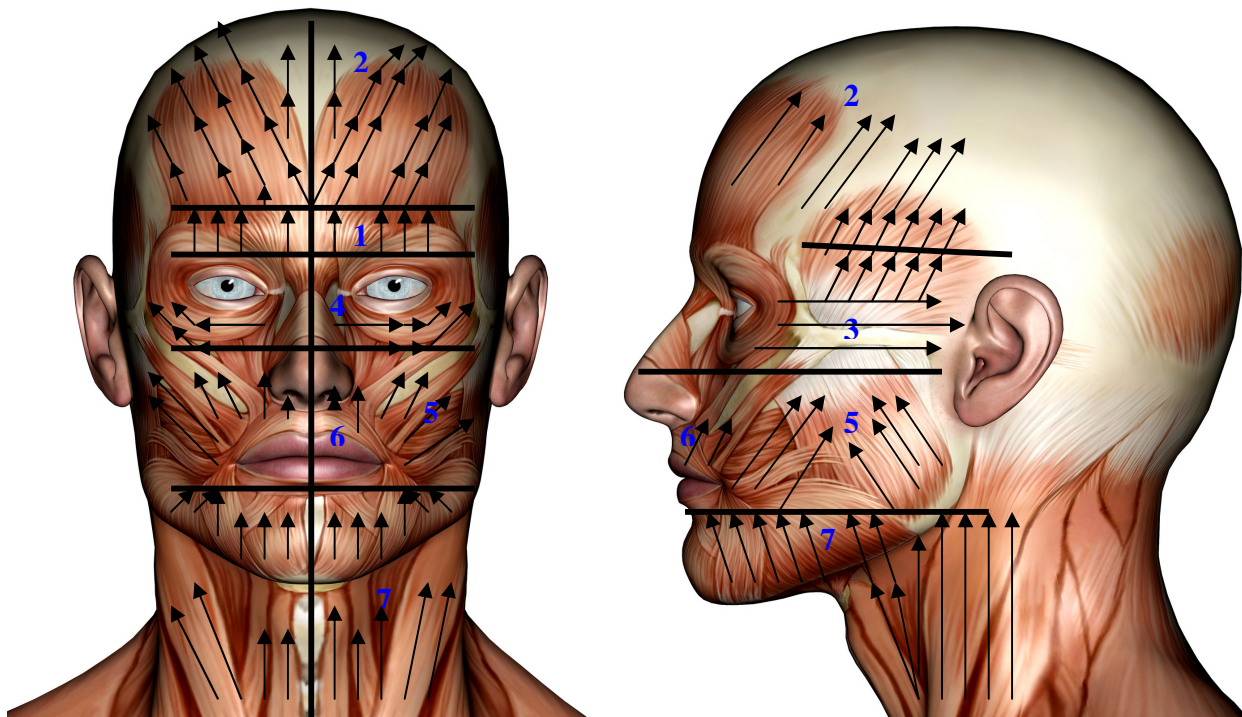

Copyright MedicTinedic ApS. Denmark

### **Det er vigtigt at ryste serumflasken grundig inden brug.**

Hold air brushen i venstre hånd, fjern hættet på den lille beholder på air brushen med højre hånd. Tryk på pipetten på enten dermaOXY Hyaluron serum eller dermaOXY Syn serum. Sæt pipetten hen over beholderen og tryk serummet ud. Dette skal gøres 2 gange. Sæt låget på beholderen.

Start maskinen. Se, at den står på 3 bar. Sigt på din egen håndryg med air brushen. Tryk aftrækkeren på air brushen ned i udgangsstilling, og mærk om der kommer oxygen ud. Tryk nu ned og træk tilbage, og mærk om der kommer serum ud på håndryggen. Slip aftrækkeren.

Behandlingen foregår i 2 trin:

1. Serum påføres huden. Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling og tilbage. ca 1-2 cm over huden, så man kan se huden blive fugtig af serum. Pas på, at serum ikke bliver sprøjtet direkte i øjet.

2. Serum iltes og presses ned i huden. Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling. Det er vigtigt, at alle områder behandles med oxygen 2-3 gange lige efter hinanden (aftrækker ned i udgangsstilling). Hvis der er et område, der trænger til mere, kan hver bevægelse gøres op til 5 gange.

Start med at behandle den ene halvdel af ansigtet. Påfør serum på den ene halvdel af ansigtet (tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling og tilbage). Skulle det være nødvendigt med mere serum senere i behandlingen kan det altid påføres på denne måde.

Start med **øjenbrynet** (område 1). Bed kunden lukke øjnene ganske blidt. Løft/stræk huden med den ene hånd, så øjenbrynet løftes, mens air brushen (aftrækker ned i udgangsstilling) med **små hurtige bevægelser** (nedefra og op) føres helt tæt på kundens hud, ca. 1-2 mm fra huden – det er OK at røre huden. Dette gøres 2-3 gange. Dette bevirker, at der normalt kommer et øjeblikkeligt løft af øjenbrynet. Dette kan virke meget overraskende for både kunde og behandler.

**Pande** (område 2): Løft/stræk huden med den ene hånd. Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling, så der kun kommer oxygen ud og følg pilene ganske **langsomt** ca. 1 cm pr. sekund – helt tæt på patientens hud, ca. 1-2 mm fra huden – det er OK at røre huden. Bliv ved med at køre nedefra og op. Løft pistolen lidt fra huden, når du tager den ned til udgangspunktet. Dette gøres 2 gange på samme sted. På selve rynkerne kan der derefter laves små cirkelbevægelser med air brushen, mens huden strækkes.

**Siden af øjet** (område 3): Løft/stræk huden med den ene hånd, mens air brushen (aftrækker ned i udgangsstilling) med **små hurtige bevægelser** (2-3 gange nedefra og op) føres helt tæt på kundens hud, ca. 1-2 mm fra huden – det er OK at røre huden. Dette er et meget vigtigt område. Lav derfor efterfølgende 2 **langsomme bevægelser**. Kør fra ydre øjenkrog ud og op. Det er vigtigt, at gå helt ud til hvor rynkerne starter. Dette kan i visse tilfælde betyde, at man skal helt ud over hårgænsen. På selve rynkerne kan der derefter, laves små cirkelbevægelser med air brushen, mens huden strækkes.

**Under øjet** (område 4): Bed patienten lukke øjnene ganske let. Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling og før air brushen **langsomt** 2-3 gange - ca. 1 cm pr. sekund – helt tæt på patientens hud, ca. 1-2 mm fra huden horisontalt fra næseryg lige under øjet og op forbi øjet.

**Kind/kindben** (område 5): Løft/stræk huden med den ene hånd. Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling og før air brushen **langsomt** 2-3 gange ca. 1 cm pr. sekund – helt tæt på patientens hud, ca. 1-2 mm fra huden. På selve rynkerne kan der derefter laves små cirkelbevægelser med air brushen, mens huden strækkes. Kinderne vil herefter se mere fyldige og løftede ud.

**Over læben/læben** (område 6): Over læben: Bed patienten lukke munden og læberne blødt i. Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling. Ram læbelinjen og lav små, **langsomme bevægelser** mod næsen. Der kan komme lidt oxygen ind i munden, og det kan give en mærkelig lyd samt kilde lidt. Gentag 1-2 gange. På læben: påfør serum (aftrækkeren ned i udgangsstilling og tilbage) Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling, bevæg nu air brushen langsomt igen 2 gange hvert sted, så hver kvadratmillimeter er behandlet 2 gange. Læben ser mere fyldig ud efter behandling.

**Hageparti, underkæbe og hals** (område 7): Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling og lav hver bevægelse **langsomt** 2 gange nedefra og op, ca. 1 cm i sekundet. (Følg tegningerne).

Den ene halvdel af ansigtet er nu behandlet. Få kunden til at se forskellen i et spejl, inden behandlingen fortsætter på tilsvarende måde med anden halvdel af ansigtet.

Se nu efter, om der er områder, der mangler.

**De vigtigste områder er:**

Mellem øjnene m. procerus.

Rundt om øjnene m. orbicularis oculi p. orbitalis

Ved siden af øjnene m. auricularis

Over og under læberne m. orbicularis oris

Hen over kindbenet m. levator labii superius, m. zygomaticus minor, m. zygomaticus major.

Hvis der er mere serum tilbage, så sprøjt resten ud på de vigtigste områder og lad det trænge ind. Lad være med at tørre serum af. Afslut med at give et tyndt lag dermaOXY Hydra på ansigtet, efterfulgt af dermaOXY Eye creme og dermaOXY Day creme.

Bed patienten rejse sig op, følg patienten hen til et spejl og vis, hvor de markante forskelle er. Bed patienten mærke, hvor fyldige kinderne er blevet, hvor meget fugt, der er tilført, og elasticiteten i huden. Endnu bedre, hvis du har en hudfugtighedsmåler, så tag en måling før og efter. Normalt vil fugtigheden være steget ca. 10 % efter første behandling. Hvis du har en Skin analyzer, kan du tage specialbilleder før og efter, og følge huden i alle faser. Din dermaOXY distributør kan skaffe disse specialinstrumenter, men de er ikke en absolut nødvendighed.



Før behandling



Efter 20 minutter

Patienten skal selv gøre en smule indtil næste behandling, som finder sted en uge efter. Se under afsnit 5 "Efterbehandling af ansigt".

Patienten skal komme til 6 behandlinger. 1 behandling om ugen i 6 uger. Enkelte kan nøjes med 4 behandlinger, og andre har måske brug for op til 12 behandlinger. Derefter anbefales det, at patienten får en behandling hver måned eller en behandling hver anden måned.

## **Vigtigt:**

- Hvis der bliver ved med at komme oxygen ud af air brushen, selv om man har sluppet aftrækkeren, tyder det på, at en pakning er gået. Disse pakninger kan skaffes hos distributøren. Behandlingen kan fortsætte, selvom der kommer oxygen ud hele tiden.
- Hvis patienten føler ubehag, så stop behandlingen. Der er ingen allergener eller parabener i produkterne, men derfor kan nogle patienter alligevel få en reaktion. Hvis produktet kommer i øjet, skyl da øjet med koldt vand.
- Hvis alarmen starter i maskinen, stop behandlingen og kontakt forhandler.

## **5. Efterbehandling af ansigt**

**Morgen:** Vask ansigtet med en mild sæbe

**Eye:** Start med Eye cremen. Brug ganske lidt. Dup den på øjenbenet i en udadgående bevægelse.

**Hydra:** Derefter lægges et tyndt lag Hydra over hele ansigtet.

**Day:** Slut af med at påføre den beskyttende og nærende Day creme.

**Aften:** Vask ansigtet med en mild sæbe. Rens huden grundigt med skin tonic.

**Eye:** Start med Eye cremen. Brug ganske lidt. Dup den på øjenbenet i en udadgående bevægelse.

**Hydra:** Derefter lægges et tyndt lag Hydra over hele ansigtet.

**Night:** Slut af med at påføre den nærende og kollagendannende Night creme.

## 6. Behandling af hår




### **Det er vigtigt at ryste serumflasken grundig inden brug.**

Hold air brushen i venstre hånd, fjern hættten på den lille beholder på air brushen med højre hånd. Tryk på pipetten på dermaOXY Hair serum. Sæt pipetten hen over beholderen og tryk serummet ud. Dette skal gøres 2 gange. Sæt låget på beholderen.

Start maskinen. Se, at den står på 3 bar. Sigt på din egen håndryg med air brushen. Tryk aftrækkeren på air brushen ned i udgangsstilling, og mærk om der kommer oxygen ud. Tryk nu ned og træk tilbage, og mærk om der kommer serum ud på håndryggen. Slip aftrækkeren.


Det er vigtigt, at alle områder behandles med oxygen 2-3 gange lige efter hinanden.

Sigt ned i hårbunden på kunden, tryk ned og tilbage på aftrækkeren, lad serum blive fordelt under tryk i hele hårbunden.

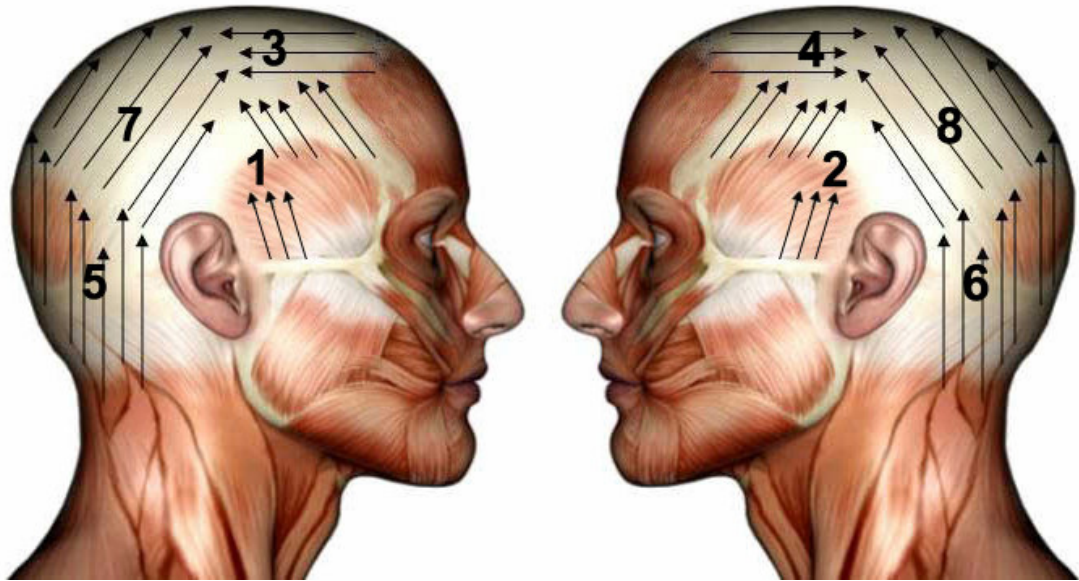

Begynd nu i område 1. Tryk aftrækkeren ned i udgangsstilling, følg pilene 2 gange efter hinanden, ganske langsomt, ca. 1 cm pr sekund – helt tæt på patientens hårbund, ca. 1-2 mm fra huden, indtil hele område 1 er blevet behandlet. Gentages 3-5 gange, hvis der er meget tør hud eller skæl. Hvis der ikke er nok serum i hårbunden, så tryk aftrækkeren ned og træk tilbage. Fortsæt til område 2 og videre til og med 8. jfr. tegning.

Se før- og efter-billede taget ved første behandling af hårbund med tør/skællende hud.

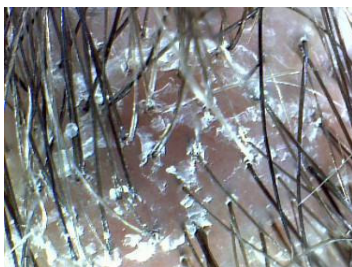

Før behandling



Efter 20 minutter

Hvis der er mere serum tilbage, så sprøjt resten ud på de vigtigste områder (tør og skællende hovedbund) og lad det trænge ind.

Hvis du har en hudfugtighedsmåler, så tag en måling før og efter. Normalt vil fugtigheden være steget ca. 10 % efter første behandling. Hvis du har en Skin analyzer, kan du tage specialbilleder før og efter, og følge hårbunden/håret i alle faser. Din dermaOXY distributør kan skaffe disse specialinstrumenter, men de er ikke en absolut nødvendighed.

Kunden skal selv gøre en smule indtil næste behandling ugen efter. Se under afsnit 7, "Efterbehandling af hår".

Kunden skal komme til 6 behandlinger. 1 behandling om ugen i 6 uger. Enkelte kan nøjes med 4 behandlinger, og andre har måske brug for op til 8

behandlinger. Derefter anbefales det, at patienten får en behandling hver måned eller en behandling hver anden måned.

### **Vigtigt:**

- Hvis der bliver ved med at komme oxygen ud af air brushen, selv om man har sluppet aftrækkeren, tyder det på, at en pakning er gået. Disse pakninger kan skaffes hos distributøren. Behandlingen kan fortsætte, selvom der kommer oxygen ud hele tiden.
- Hvis patienten føler ubehag, så stop behandlingen. Der er ingen allergener eller parabener i produkterne, men derfor kan nogle patienter alligevel få en reaktion. Hvis produktet kommer i øjet, skyl da øjet med koldt vand.
- Hvis alarmen starter i maskinen, stop behandlingen og kontakt forhandler.

## **7. Efterbehandling af hår**

**Shampoo:** Tag, hvad der svarer til en teskefuld shampoo, masser det godt ind i håret og skyl. Gentag dette endnu en gang. Vask kun håret højst hver anden dag.

**Hair tonic:** Tag, hvad der svarer til en teskeskefuld tonic i håndklædetørt hår eller tørt hår. Masseres ind i hår og hårbund. Skal ikke skylles ud. Anvend tonic hver anden dag.

## **8. Produktbeskrivelse**

### **8.1 dermaOXY hudserie**

#### **Serummer:**

**Hyaluron serum:** Reducerer rynker, giver glattere og friskere hud.  
**Syn serum:** Blokerer musklernes evne til at trække sig sammen, hvorved der opnås en umiddelbar reduktion af hudens rynker.

#### **Cremer:**

**Day:** Genopbyggende anti-rynke dagcreme med hyaluronsyre.  
**Night:** Særlig nærende og genopbyggende natcreme, der samtidig har antiaging effekt.  
**Eye:** Øjencreme, der reducerer de fine rynker omkring øjnene og tilfører og opbygger fugtighed.  
**Hydra:** Tilfører øjeblikkelig fugtighed til huden. Anvendes som supplement til dag- og/eller natcreme.

## Ingredienseroversigt – dermaOXY hudserie

Ingrediens	Hyaluron Serum	Syn Serum	Day	Night	Eye	Hydra	Virkning
<b>Hyaluron syre</b>	X*	x*	x	x	x	x*	*Hyaluronic Acid og Sodium Hyalluronate. Binder store mængder af fugtighed i huden og danner et skjold, der øger hudens elasticitet og blødhed. Hyaluron syre er en naturlig bestanddel i hudens bindevæv.
<b>Magnesium Ascobyl Phosphate</b>	x	x	x			x	C - vitamin, kraftig antioxidant. Beskytter hudens celler mod de frie radikaler, DNA og UV stråling. Øger hudens elasticitet. Stimulerer kollagenet i hudens bindevæv og virker anti-aging.
<b>Små peptider Tripetid</b>	x		x	x	x		Reducerer alle former for rynker og stimulerer hudens kollagenproduktion, der mindskes med årene, hvilket medvirker til rynkedannelse.
<b>Palmoyl oligopeptide</b>	x	x					Stimulerer cellevæksten og reducerer dybe rynker
<b>Tripeptide-7</b>	x	x					Påvirker kollagen og elastin produktionen i huden
<b>Pepha-Ctive</b>	x						Microalge ekstrakt, der øger cellernes iltoptagning
<b>Colostrum Whey</b>	x	x					Algeekstrakt, der øger cellefornyelsen og udjævner rynker. Forsyner huden med næringsstoffer. Rig på aminosyrer, mineraler og Vitaminer.
<b>ECOCERT</b>	x	x	x	x			Soya protein, der er rig på aminosyrer og øger oxygen optagelsen.
<b>Vitaminer A,B1,B2,B3,B6,D,E,F A,E,F,H</b>	x	x		x	x	x	A-vitamin (retinol) har anti-aging effekt samt regulerer og fremmer celledannelsen. Modvirker trans epidermal waterloss (TEWL) Gør huden mere elastisk ved at forøge tykkelsen af epidermis. Forebygger UV lysets negative påvirkning af huden. Vit. A penetrerer dybt ned i de øverste hudlag, hvor det stimulerer dannelsen af tabt kollagen, så rynker udjævnes og huden får et mere ungdommeligt udseende. Effektiv antioxidant, der modvirker tilstoppede porer og bidrager til et sundere udseende.
<b>Omega 3 og 6 fedtsyrer</b>	x	x		x			
<b>Squalene</b>	x	x					Med Enzym Catalyzed og moisturizer.
<b>Kaprifolie</b>	x	x	x	x	x	x	Naturlig konservering
<b>Q10, vitamin E</b>		x		x	x		I synergi er det kraftige antioxidant, der modvirker de frie radikalers nedbrydning af hudens celler, samtidig med at hudens lipidbarriere beskyttes. Vitamin E fungerer samtidig som naturlig fugtbinder.
<b>Green Tea</b>			x	x			Antioxidant, opstrammende og stimulerende.
<b>Cornflower</b>				x	x		Virker beroligende og afslappende.
<b>Macadamia nøddeolie Mangokerne butter</b>				x			Giver cremen en lækker konsistens samtidig med, at der tilføres vitaminer og essentielle olier. Begge olier har en god indtrængning.
<b>Kompleks af petider, aminosyrer og mineral-salte</b>			x	x			Booster iltoptagelsen og stimulerer cellefornyelsen ved at efterligne cellernes egen metabolisme.
<b>Tetrapeptide-7</b>					x		Reducerer poser og mørke rande under øjenerne ved at øge hudens elasticitet og reducerer fugtighedstab.
<b>Hvedkimsolie</b>			x		x		Øger fugtighedsindholdet i huden.
<b>UV filter</b>			x				Tilsat
<b>Specielt peptide kompleks</b>		x					Et stort indhold af peptid kompleks, der efterligner det muskellammende stof, der findes i slangen Temple Viper. Den særlige aminosyre-sammensætning blokerer musklernes evne til at trække sig sammen, hvorved der opnåes en umiddelbar reduktion i hudens rynker.
<b>Super dismutase (SOD)</b>		x					Et af de stærkeste antioxidant, der findes på markedet
<b>Ikke tilsat parabener</b>	x	x	x	x	x	x	

## 8.2 dermaOXY hårserie

### Serum:

**Hair:** Stimulerer celfornyelsen og øger hårets vækst, styrke og elasticitet. Beskytter mod oxidation og ældning. Bevarer hårets farve.

### Hårprodukter:

**Shampoo:** Stimulerer celfornyelsen og øger hårets vækst, styrke og elasticitet.

**Hair Tonic:** Stimulerer hårbunden og øger blodgennemstrømningen, så hår-bunden bliver sundere samtidig med, at hårets vækst og pigmentering styrkes.

## Ingrediensoversigt – dermaOXY hårserie

Ingrediens	Hair serum	Shampoo	Hair tonic	Virkning
Hyaluronsyre	X	x		Binder store mængder af fugtighed i huden og danner et skjold, der øger hudens elasticitet og blødhed. Hyaluron syre er en naturlig bestanddel i hudens bindevæv.
Phylderm vegetal	X	x		Et særligt aktivt kompleks af peptider, aminosyrer og mineralske salte, der booster cellernes iltoptagelse og energiniveauet i cellerne. Stimulerer celfornyelsen og øger hårets styrke.
Squalene	x			Med Enzym Catalyzed og moisturizer. Fungerer også som transportør – indgår i hudens sebum og yder dermed en naturlig beskyttelse for huden.
Hvedekimsolie	x			Øger fugtighedsindholdet i huden. Rig på A, D, og E vitaminer og essentielle fedtsyrer samt lecitin. Fugtbinder med blødgørende effekt. Særlig godt til irriteret og tør hud og hårbund.
Macadamia nøddeolie	X			Asorberes let af huden, rig på Lipoproteiner, omega 3, 6, og 9 fedtsyre. Beskytter cellemembranen.
Carrot oil	x			Forstadie til A-vitamin.
Vitaminer	A B3,B5, E, F, H,	A B3,B5, E, F, H,	A, C, E, F, H	Bidraget med næring til hår og hovedbund. Vitamin C og E modvirker oxidation og ældning. Vitamin F tilfører de essentielle fedtsyrer, der er betingelse for hårets vækst. Vitamin H modvirker hudsygdomme og reducerer fælding.
Malva plante	x			Schweizisk alpeplante med anti-septiske og anti-flammatoriske egenskaber. Kraftigt antioxidant, der sammen med vitamin E modvirker dannelsen af frie radikaler i huden. Malva er rig på aminosyrer, vitamin C, B1, B2 og flavonoider.
Små peptider (teripetider)	x			Syn-coll. Reducerer alle former for rynker. Stimulerer hudens kollagenproduktion og kompenserer for hudens kollagenmangel.
Anti-aging hairkompleks	x	x		Styrker det enkelte hårstrå og tilfører håret naturlig glans. Også velegnet til farvet hår, idet det medvirker til at fastholde og bevare farven. Stort indhold af vitamin E beskytter mod oxidation og ældning.
Aloe Vera	x	x		Et stort indhold af håndplukket, koldpresset Aloe Vera saft, indeholder en række værdifulde stoffer, bl.a. sjældne enzymer, antibiotika, protein indeholdende 18 forskellige aminosyrer, (hårhelende homoner) samt en række essentielle mineraler, der styrker håret.
Japansk blodgræs	x	x		Rig på calcium, der er med til at opretholde det osmotiske tryk (vandbalancen) i cellerne og dermed genopbygge hårbundens fugtighedsbalance. Særlig god virkning på tør hovedbund.
Plantekompleks			x	Udtræk af humle, kamille, melisse, yarrow og fennikel der er særlig velegnet til følsom og sensitiv hårbund.
Pantothem syre gruppe			x	Aktivt kompleks af vitaminer, specielt D-panthenol, calciumpantothemate og vit. B1, som i kombination har en gavnlig effekt overfor infektioner samtidig med at hårets vækst og pigmentering styrkes.
Menthol			x	Øger blodgennemstrømningen samtidig med at der opnåes en let kølende effekt.